



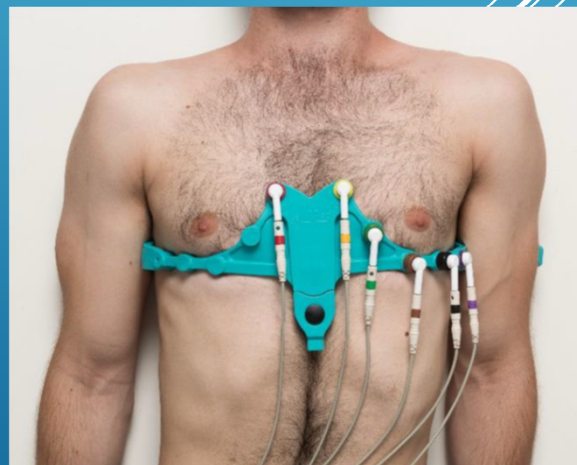

Dimédica
Tel.: 239947006 Móvel: 919248836
www.dimedica.com geral@dimedica.com

MANUAL DE INSTRUÇÕES



LevMed Banda de ECG AllBrand™ com apoio de braços

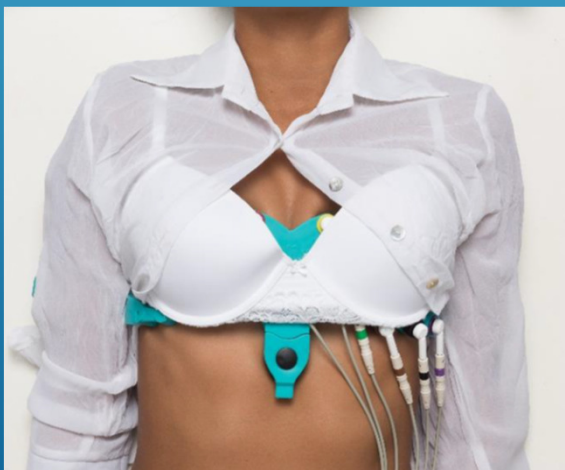



Dimédica
Tel.: 239947006 Móvel: 919248836
www.dimedica.com geral@dimedica.com

SIGA ESTAS INSTRUÇÕES PASSO A PASSO:

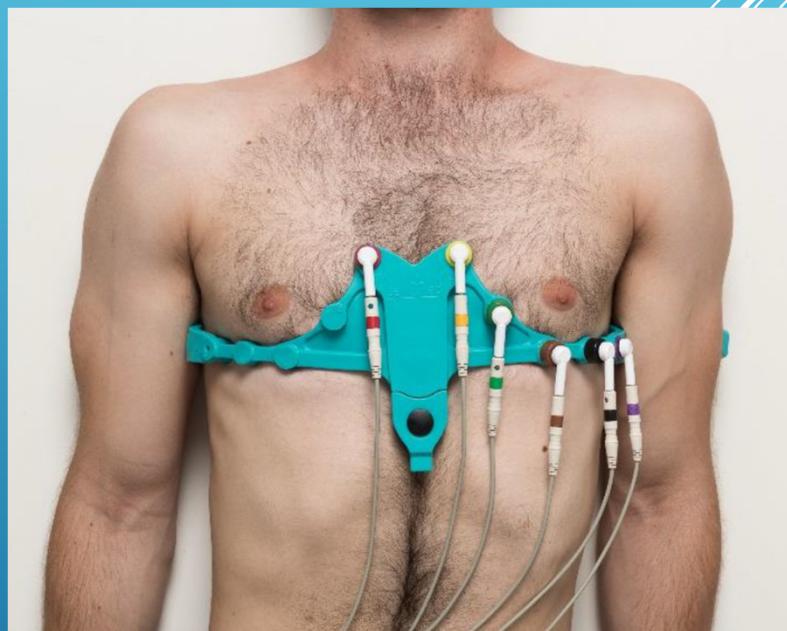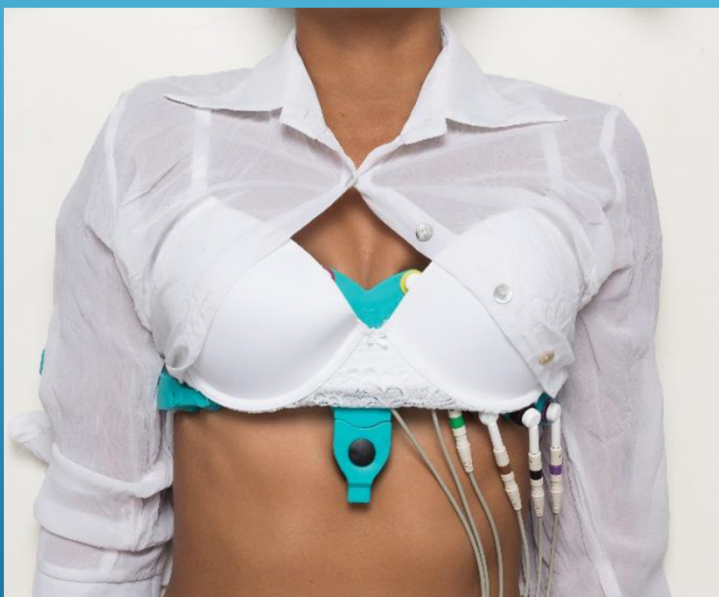

LevMed Banda de ECG AllBrand™ com apoio de braços



Dimédica

Tel.: 239947006 Móvel: 919248836
www.dimedica.com geral@dimedica.com

VERIFIQUE SE O CABO DO PACIENTE ESTÁ LIGADO AO DISPOSITIVO DE ECG.

Verifique se os parafusos na banda do ECG estão bem apertados:





Dimédica

Tel.: 239947006 Móvel: 919248836

www.dimedica.com geral@dimedica.com

LIGUE O CABO DO PACIENTE AOS PARAFUSOS USANDO OS LIGADORES DE ENCAIXE / CROCODILO:

Adaptador Banana para encaixar



Adaptador de banana para crocodilo



* Se o seu cabo de paciente de ECG tiver conectores Banana, use o para encaixe ou a banana nos adaptadores de crocodilo.



Dimédica

Tel.: 239947006 Móvel: 919248836
www.dimedica.com geral@dimedica.com


LIGUE O CABO DO PACIENTE DE ECG A CADA UM DOS 4 ELÉTRODOS DE MOLA:

Para cabo de paciente de banana:

- 1) Abra o parafuso.
- 2) Insira o conector banana
- 3) Feche o parafuso.

Para cabo do paciente Crocodilo:

- 1) Feche o parafuso.
- 2) Conecte o snap / crocodilo.

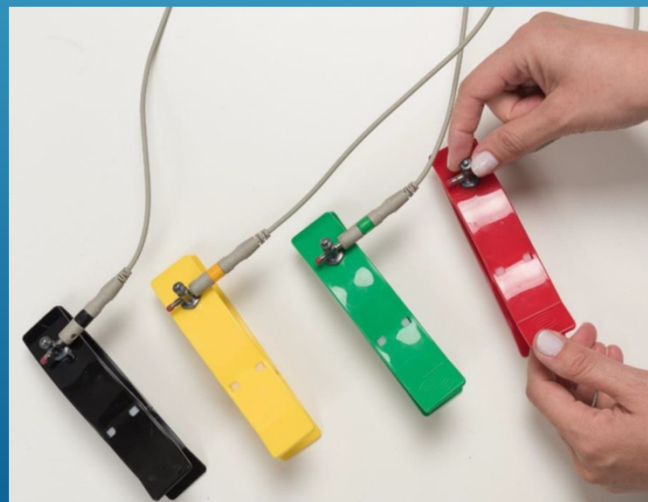









Dimédica

Tel.: 239947006 Móvel: 919248836

www.dimedica.com geral@dimedica.com

ABRA OU REMOVA A CAMISA DO PACIENTE:

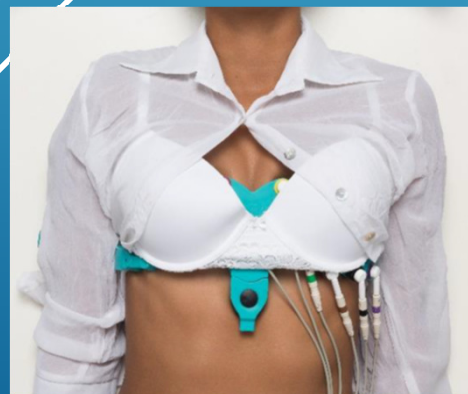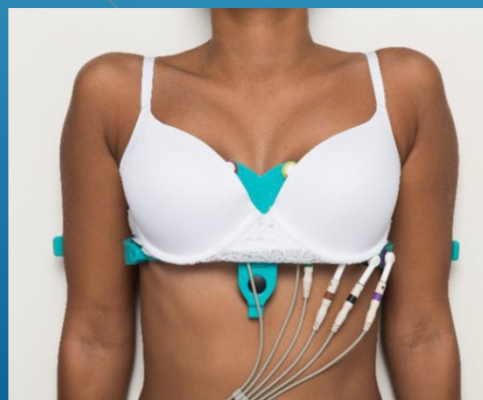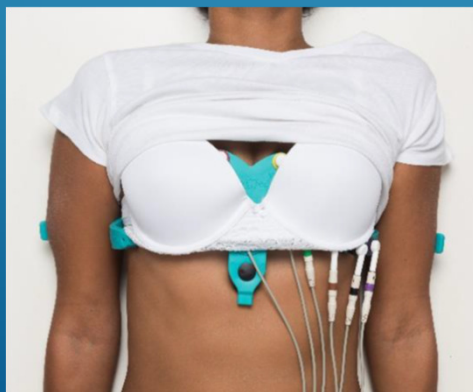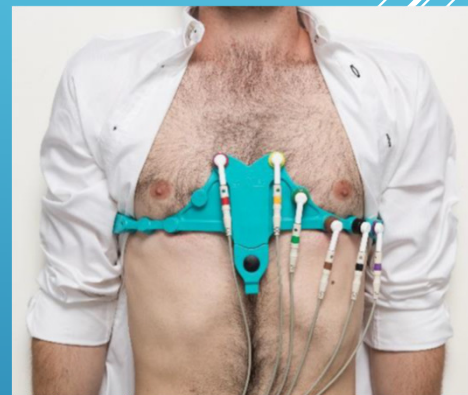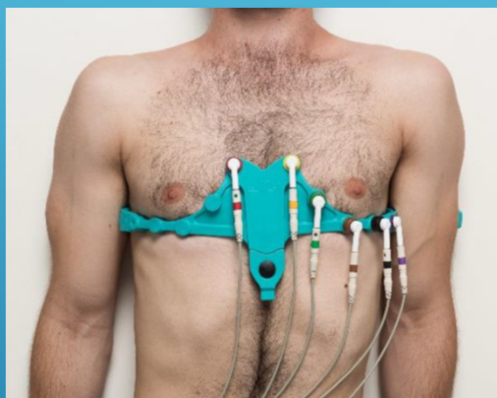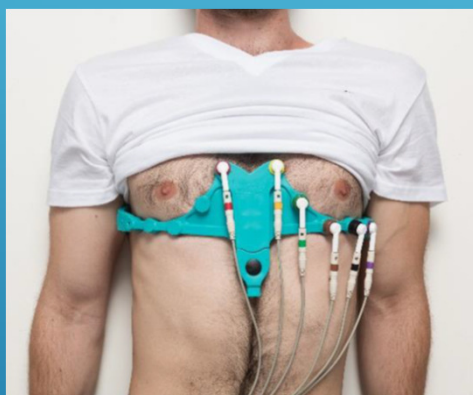

MOLHE OS 6 ELÉTRODOS (V1 - V6) COM ÁGUA





Dimédica

Tel.: 239947006 Móvel: 919248836
www.dimedica.com geral@dimedica.com

AJUSTE AS ALÇAS DIREITA E ESQUERDA PARA CABER NOS BRAÇOS DO PACIENTE:






Dimédica

Tel.: 239947006 Móvel: 919248836
www.dimedica.com geral@dimedica.com


**SE NECESSÁRIO, DOBRE V1 E V2 PARA GARANTIR
CONTATO DO ELÉTRODO COM O PEITO DO PACIENTE:**




QUANDO O PACIENTE ESTIVER DEITADO CONFORTAVELMENTE, APLIQUE O CINTO NO PEITO DO PACIENTE COM V1 E V2 SIMETRICAMENTE AMBOS OS LADOS DO ESTERNO:

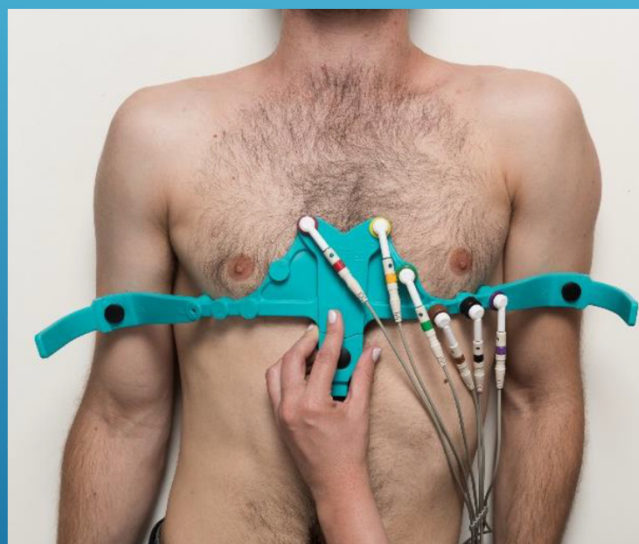


Nota: nas mulheres, o cinto deve ser aplicado sob o sutiã

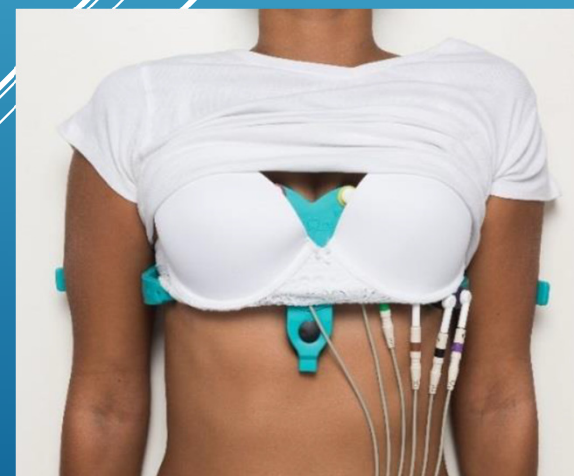

APLIQUE AS ALÇAS NOS BRAÇOS, ENTRE O COTOVELO E O OMBRO:

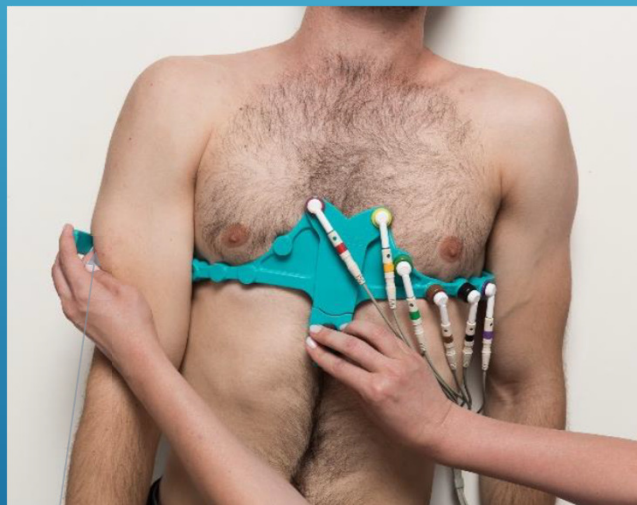

Alça
Esquerda

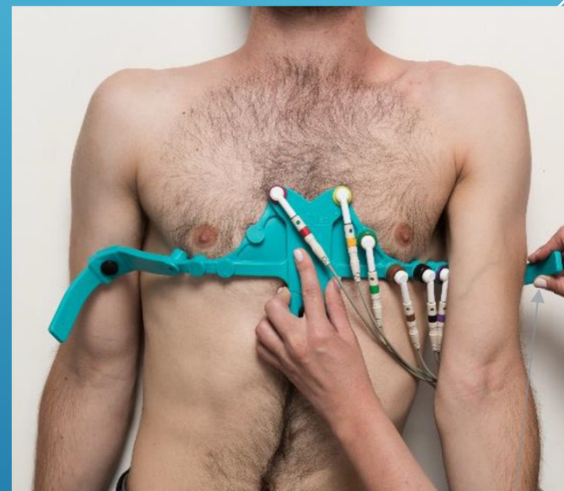

Alça
Direita




Dimédica

Tel.: 239947006 Móvel: 919248836

www.dimedica.com geral@dimedica.com

**CONFIRME OS ELÉTRÓDOS V4, V5 E V6
ESTÃO LOCALIZADOS ABAIXO DO PEITO:**

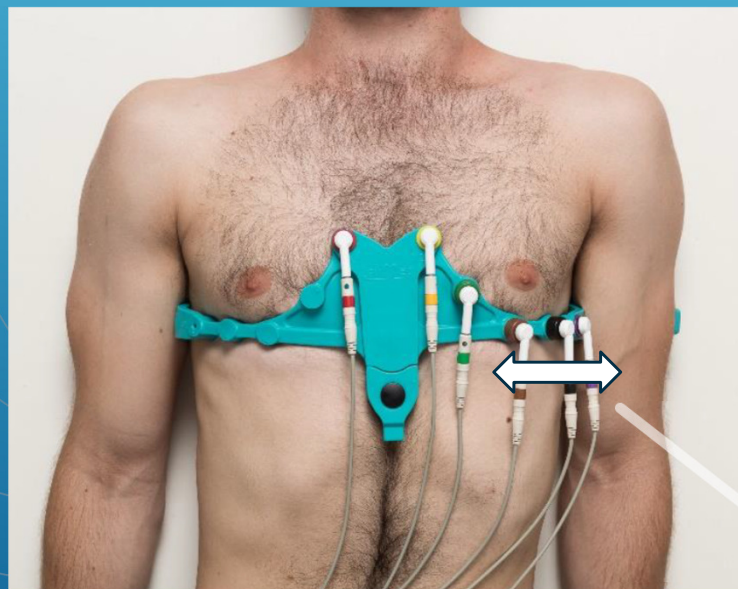

V4, V5, V6





Dimédica

Tel.: 239947006 Móvel: 919248836

www.dimedica.com geral@dimedica.com

**VERIFIQUE SE TODOS OS 6 ELÉTRODOS ESTÃO EM
CONTATO COM A PELE DO PACIENTE:**

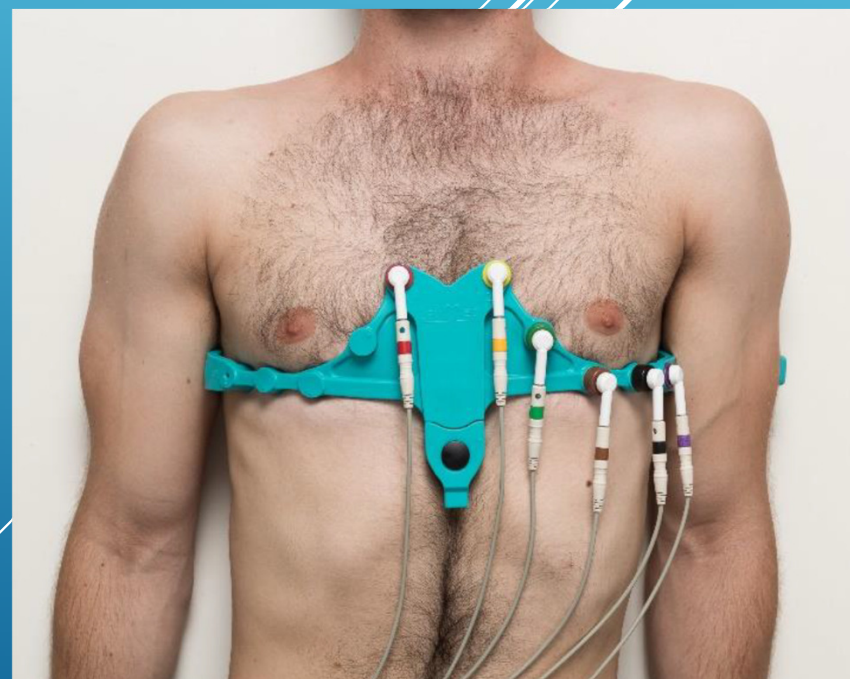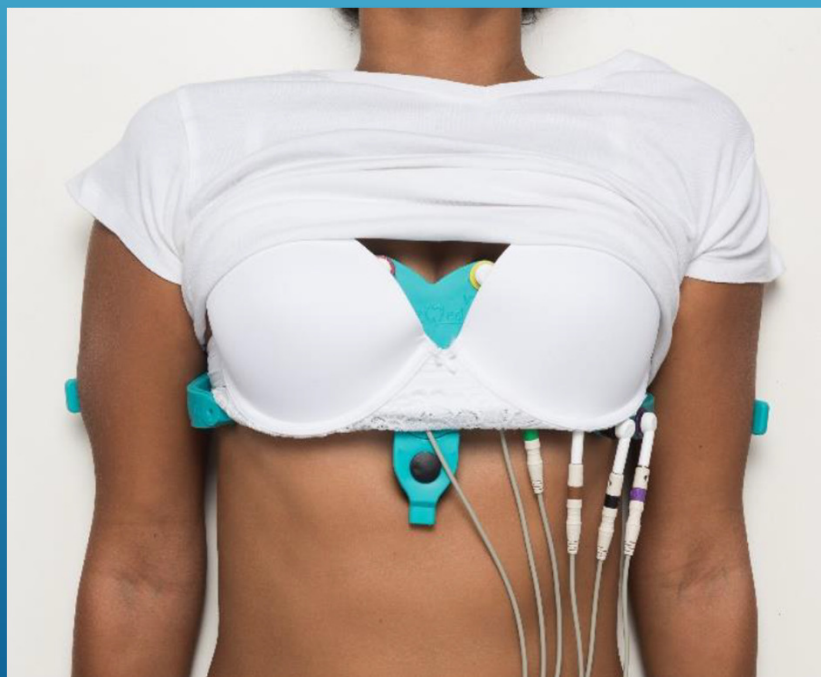



Dimédica

Tel.: 239947006 Móvel: 919248836
www.dimedica.com geral@dimedica.com

MOLHE OS ELÉTRODO DE MOLA, UM DE CADA VEZ, COM ÁGUA:





Dimédica

Tel.: 239947006 Móvel: 919248836
www.dimedica.com geral@dimedica.com

APLIQUE OS ELÉTRODOS DE MOLA NOS MEMBROS:

VERMELHO = BRAÇO DIREITO

AMARELO = BRAÇO ESQUERDO

VERDE = PERNA ESQUERDA

PRETO = PERNA DIREITA





Dimédica

Tel.: 239947006 Móvel: 919248836
www.dimedica.com geral@dimedica.com

VERIFIQUE QUE O PACIENTE ESTEJA RELAXADO E NÃO FORÇAR SEUS MÚSCULOS.

SOLICITE AO PACIENTE PARA NÃO SE MOVER OU FALAR DURANTE A AVALIAÇÃO.






Dimédica

Tel.: 239947006 Móvel: 919248836
www.dimedica.com geral@dimedica.com

NOTA: CASO SEJA MAIS CONFORTÁVEL, A AVALIAÇÃO PODE SER FEITA ENQUANTO O PACIENTE ESTÁ SENTADO..


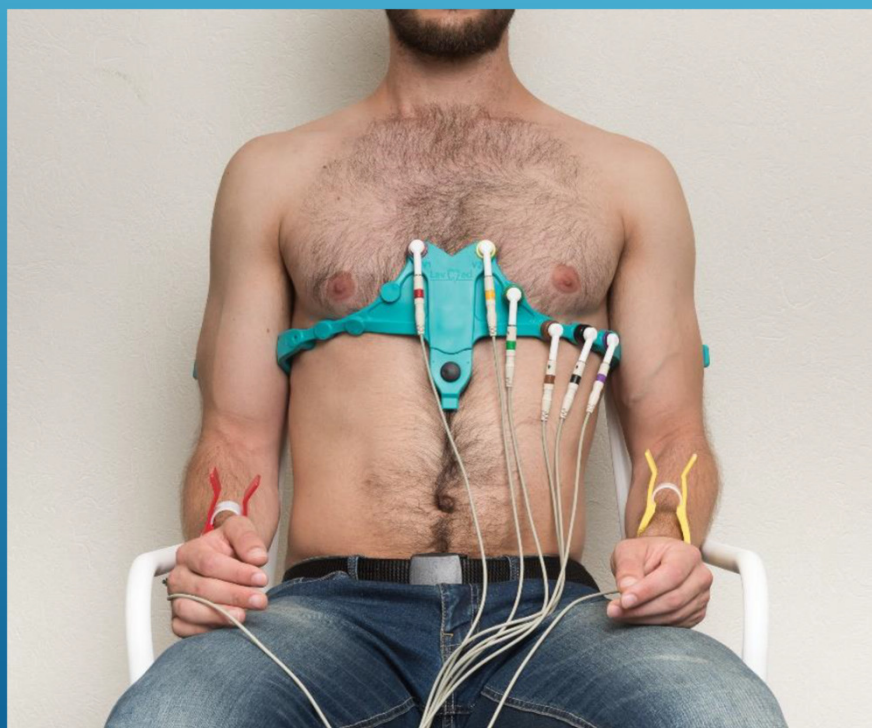




Dimédica

Tel.: 239947006 Móvel: 919248836
www.dimedica.com geral@dimedica.com

PRESSIONE 'INICIAR' NO DISPOSITIVO DE ECG PARA FAZER A LEITURA DE ECG.

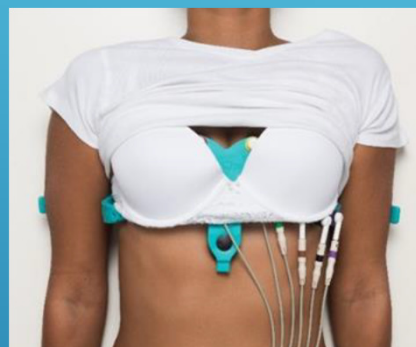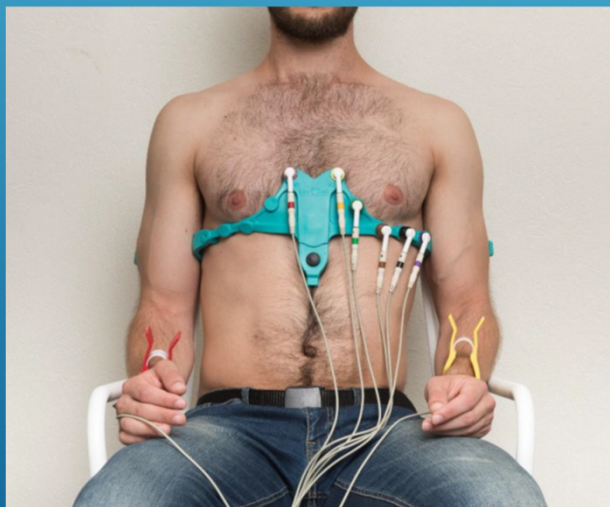



Dimédica

Tel.: 239947006 Móvel: 919248836
www.dimedica.com geral@dimedica.com

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

CASO HAJA RUÍDO NO SINAL DE ECG, VERIFIQUE:

- 1) A ÁGUA É APLICADA EM TODOS OS ELÉTRODOS.**
- 2) TODOS OS ELÉTRODOS ESTÃO EM CONTATO DIRETO COM A PELE DO PACIENTE.**
- 3) O PACIENTE ESTÁ RELAXADO, MÚSCULOS NÃO TENSOS**





Agradecemos a vossa preferência para utilizar

LevMed Banda de ECG AllBrand™



Dimédica

Tel.: 239947006 Móvel: 919248836 www.dimedica.com
geral@dimedica.com